

blink™
refreshing

Augentropfen für den täglichen Gebrauch
20 x 0.5ml

AMO®




D Lässt müde Augen sofort wacher aussehen

Diese regenerierende Formulierung ist so sanft, dass sie jeden Tag verwendet werden kann. Sie verbessert sofort die natürliche Feuchtigkeit Ihrer Augen und verleiht ihnen ein klares, kühles und lebendiges Gefühl. Schlafmangel, Flugreisen, Klimaanlage, längere Konzentrationszeiten, Staub und Pollen können dazu führen, dass Ihre Augen trübe und müde aussehen und sich auch so anfühlen – halten Sie blink™ immer bereit, damit Ihre Augen natürlich schön aussehen.

Diese Formulierung kann sicher mit Kontaktlinsen verwendet werden

Gebrauchsanleitung

- Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das betroffene Auge träufeln
- Mehrmals blinzeln, um Auge zu spülen
- Können so oft wie nötig verwendet werden
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, müssen Sie diese vorher nicht herausnehmen

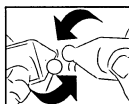

Vorsichtsmaßnahmen

- Stets frische Lösung verwenden
- Nicht verwenden, wenn die Ampulle beschädigt ist
- Lösung nicht schlucken
- Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, Öffnung der Ampulle nicht mit Oberflächen in Berührung bringen und Kontakt mit den Augen vermeiden
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Zwischen 2°C und 25°C aufbewahren
- Ampulle und Lösungsreste unmittelbar nach dem Gebrauch wegwerfen



Wenn Ihre Probleme anhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.

Inhalt:

Polyvinylalkohol 1,4%(PVA)
Dinatriumedetat 0,01% (EDTA)
Natriumchlorid
Natriumphosphat Monobasisch
Natriumphosphat Dibasisch Heptahydrat
Destilliertes Wasser



Vom Spezialisten empfohlen

Symbole:



Siehe
Gebrauchsanleitung



Hergestellt von

STERILE A Steril

CE 0050 STERILE A

AMO Ireland, Sweepstakes Centre, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
AMO Germany GmbH, Rudolf-Plank-Straße 31, 76275 Ettlingen, Deutschland

AM7155HEV14B

blinkTM
refreshing
Göz Damlası
20 x 0.5ml

AMO®




TR Yorgun gözleri hemen canlandırır

Her gün güvenle kullanılabilen bu yenileyici formül gözünüzün doğal nemine destek sağlayarak gözlerinizi canlı, parlak ve nemli tutar. Uykusuzluk, uçak yolculuğu, iklimli ortamlar, uzun süre yoğun çalışma, tozlar ve polenler gözlerinizi mat ve yorgun gözükmesine sebep olabilir. Gözlerinizi doğal haliyle güzel gözükmesi için yanınızda blinkTM bulundurun.

blinkTM kontakt lenslerle güvenle kullanılabilir

Kullanım talimatı

- Göze 1 ya da 2 damla damlatınız
- Gözlerinizi temizlemek için birkaç kez kırınız
- İhtiyaç duyulduğu kadar kullanılabilir
- Kontakt lenslerin çıkarılmasına gerek yoktur

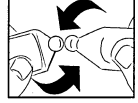

Uyarılar

- Daima taze solüsyon kullanınız
- Eğer ampul hasar görmüş ise kullanmayınız
- Solüsyonu yutmayınız
- İçeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız
- Kirlenmeyi engellemek için, şişenin ucunu hiçbir yere deđdirmeyiniz ve göze temasından kaçınınız
- Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız
- Çocukların erişemeyeceđi yerde saklayınız
- 2°C-25°C'de saklayınız
- Kabı ve varsa kalan solüsyonu kullanımdan sonra hemen atınız



Problemleriniz devam ederse lütfen göz doktorunuzla görüşün

İçeriđi:

Polivinil Alkol %1,4 (PVA)
Disodyum Edetat %0,01 (EDTA)
Sodyum Klorür
Sodyum Fosfat Monobazik
Sodyum Fosfat Dibazik Heptahidrat
Distile Su



Göz doktorlari tarafından önerilir

Sembol:



Kullanım talimatlarına
bakınız



Üretici firma

STERILE A

Steril