

GEBRAUCHSANWEISUNG

Beur
EndWarts®



Ätzend

EndWarts ist eine Lösung zur Entfernung von Warzen, die zur Behandlung von Hand-, Fuß- und Körperwarzen eingesetzt werden kann. Nicht anwenden bei Gesichtswarzen, Warzen im Genitalbereich, Hühneraugen, Dellwarzen, Hautverhärtungen oder anderen Hautveränderungen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.

WAS IST ENDWARTS

EndWarts ist eine Warzen entfernende Lösung, die sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern angewendet werden kann. Das Mittel hilft dem Körper, die Warzen auszutrocknen, so dass der Körper sie abstößt. EndWarts wirkt nachhaltig, für seine Wirkung genügt eine kleine Menge. Die Lösung dringt direkt in die Warze ein. EndWarts hinterlässt keine Spuren auf der Haut und ist nicht sichtbar. So können beispielsweise direkt nach dem Auftragen Strümpfe angezogen oder ein Bad genommen werden.

EndWarts ist ein in Schweden patentiertes Medizinprodukt, das die CE-Kennzeichnung trägt und biologisch abbaubar ist. EndWarts wirkt gegen Bakterien und verursacht weder Narben noch führt es zu Infektionen. Eine Flasche EndWarts (5 ml) reicht für ca. 30 Behandlungen von 1–5 Warzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Produkt wirkt bereits beim Auftragen sehr geringer Mengen. Eine falsche Anwendung oder Überdosierung kann zu Schmerzen und Hautschäden führen. Bei der Anwendung einer zu großen Menge oder falls versehentlich EndWarts auf die Haut gelangt, kann die Außenhaut zusammenschrumpfen und es können sich Blasen bilden. Solche Hautschäden verheilen meist nach ein paar Wochen.

Besonders vorsichtig bei Kindern und Diabetikern oder in Bereichen mit dünner Haut anwenden; siehe Dosierung und Anwendung.

Warzen **nicht abfeilen**. Die Warzen werden dann möglicherweise druckempfindlich und bilden wieder eine neue harte Oberfläche. **Niemals Pflaster verwenden**. Die Anwendung von Pflastern während der Behandlung kann zu Druckempfindlichkeit oder Hautschäden führen. EndWarts ist **ätzend** und riecht stark. Nicht trinken oder einatmen. Sollte das **Mittel versehentlich auf die Haut gelangen**, diese sofort mit kaltem Wasser abspülen. Sollte das Mittel **in die Augen gelangen**, diese 15 Minuten lang mit reichlich handwarmem Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Gehen Sie bei der Anwendung sehr behutsam vor. Die Flasche sollte bei der Anwendung nicht in der Hand gehalten werden. Stellen Sie die Flasche auf ein Waschbecken oder eine ähnliche Ablage. Kontakt mit verschütteter Lösung kann zu Schäden auf Ihrer Haut, an gestrichenen Oberflächen, Textilien usw. führen. Nach der Anwendung den Verschluss wieder sorgfältig zuschrauben. Benutzte Wattestäbchen sollten vor dem Entsorgen mit Wasser abgespült werden.

-  Ein Wattestäbchen in EndWarts eintauchen und sorgfältig am Flaschenrand abstreifen. Das Wattestäbchen sollte nur feucht sein.
-  Mit dem Wattestäbchen die Warze 2–3 mal betupfen. Dabei darauf achten, dass die umgebende Haut nicht berührt wird.
- Die Warze **regelmäßig** einmal wöchentlich behandeln, bis sie verschwunden ist, da andernfalls der Heilungsprozess unterbrochen wird. Wenn die Heilung nach 4–5 Behandlungen gut voranschreitet, kann das Mittel alle 5 Tage aufgetragen werden. Dies gilt besonders für alte, große Warzen bei Erwachsenen. Die Dosis darf nicht überschritten werden.
- Bei der Behandlung von Warzen auf **dünnere Haut** ist teilweise eine geringere Menge der Lösung ausreichend. Führen Sie die Behandlung weniger häufig durch, beispielsweise nur jede zweite oder dritte Woche.
- Bei der Behandlung mehrerer Warzen (mehr als fünf) behandeln Sie zunächst nur einige Warzen, um zu sehen, wie diese reagieren. Wenn die Heilung gut voranschreitet, beginnen Sie nach ein paar Wochen mit der Behandlung der übrigen Warzen. Mehrere kleine Warzen können gleichzeitig behandelt werden, ohne dass das Wattestäbchen erneut in EndWarts eingetaucht werden muss (tauchen Sie das Wattestäbchen einmal in die Lösung, reicht dies für 3–5 oder teilweise mehr Warzen – je nach Warzengröße). Beginnen Sie mit den größten Warzen. Zuweilen können unter der Haut liegende neue Warzen zum Vorschein kommen.
- Nach einigen Behandlungen sind meist schwarze Punkte in der Warze zu sehen. Dabei handelt es sich um kleine Kapillargefäße, die im Zentrum der Warze wachsen, um sie mit Blut zu versorgen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Warze abheilt, und die Behandlung sollte so lange fortgesetzt werden, bis die schwarzen Punkte und die Warze vollständig verschwunden sind. Manchmal können die schwarzen Punkte etwas bluten, wenn an der Warze gekratzt wurde. Warten Sie mit dem Auftragen von EndWarts einige Minuten, bis die Blutung aufhört, da ansonsten ein leichtes Stechen auftreten kann. Tragen Sie in diesem Fall etwas Wasser auf, um den Schmerz zu lindern. Die Warze kann zunächst auch weiß werden und nach außen wachsen, bevor sie beginnt auszutrocknen. Wenn die Warze wächst, kann die umliegende Haut druckempfindlich werden.
- Die Warze ist zwischen den Behandlungen durch Anwendung einer normalen Körperlotion oder eines Hautöls weich zu halten. Dann lassen sich die Hautreste der Warze leichter entfernen. Sollte sich die Warze empfindlich anfühlen oder pochen, kann das daran liegen, dass zu viel Warzenmittel aufgetragen wurde und/oder dass die Warze nicht in der Lage ist, die Haut über der Warze zu durchbrechen. Wenn die Haut wie ein Deckel über der Warze liegt, ist sie zu öffnen, damit die Warze herausgelangen kann. Bei Nagelbandwarzen kann eine kleine Öffnung in

der äußersten Hautschicht erforderlich sein, damit das Mittel in die Warze eindringen kann. Bei einer alten oder harten Warze den betroffenen Bereich vor der Behandlung 20–30 Minuten lang in warmem Wasser aufweichen. Entfernen Sie die Haut über der Warze, z.B. mit einer Pinzette. Bei dicker Haut und nach innen wachsenden Warzen die harte Haut vorsichtig entfernen.

BEHANDLUNG VON KINDERN

Kinder dürfen nur von den Eltern behandelt werden. Dabei die Dosierung beachten und beim Auftragen vorsichtig vorgehen, da das Mittel ätzend wirkt. Kleine Kinder haben weiche, dünne Haut. Tragen Sie bei Kinderwarzen nur eine sehr geringe Menge EndWarts auf. Tauchen Sie das Wattestäbchen einmal in die Lösung, reicht dies für mehrere Warzen. Die Warzen verschwinden in der Regel nach 2–3 Behandlungen.

Kinder **unter 4 Jahren** dürfen mit EndWarts behandelt werden, dabei jedoch immer darauf achten, dass es sich tatsächlich um eine Warze handelt und nicht um eine andere Hautschädigung. Konsultieren Sie vor der Behandlung Ihren Haus- oder Kinderarzt. Bei Kindern unter 4 Jahren ist eine Verringerung der Dosis besonders wichtig. Streichen Sie überschüssige Mengen des Mittels immer an einem Tuch ab, bevor Sie die Warze mehrmals leicht betupfen.

- Falls das Kind an dem Finger lutscht, an dem sich die Warze befindet, reicht es, diese abzuwaschen, da das Mittel sofort eindringt.
- Bei Brennen oder Stechen während der Behandlung die Warze mit kaltem Wasser abspülen und kein Mittel mehr auftragen, da dieses bereits in die Warze eingedrungen ist.

BEHANDLUNG VON DIABETIKERN

Diabetiker sollten EndWarts nur an gesunden Hautstellen (nicht durch die Erkrankung geschädigt) und mit besonderer Vorsicht anwenden. Bei Problemen konsultieren Sie Ihren Arzt/Ihren Apotheker.

WIE LANGE DAUERT DIE BEHANDLUNG MIT ENDWARTS?

EndWarts ist nachgewiesen wirksam gegen Warzen. Die meisten Warzen verschwinden, ohne wieder aufzutreten. Es gibt jedoch viele verschiedene Arten von Warzen, und daher kann die für die Entfernung erforderliche Zeit unterschiedlich lang sein. Die Behandlungsdauer kann variieren: Meist sind 5 bis 15 Behandlungen erforderlich. Die erforderliche Behandlungsdauer bis zum Verschwinden der Warzen kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter das Alter des Patienten, die Art der Warze, das Immunsystem des Patienten, die Stelle, an der sich die Warze befindet und wie lange die Warze schon existiert. Eine herabgesetzte Immunabwehr und Medikamente wie z.B. Kortison sind Faktoren, welche die Behandlungsdauer verlängern können. Neue Warzen lassen sich meist leichter entfernen als alte. Kinderwarzen lassen sich meist leichter entfernen als Warzen bei Erwachsenen. Bei nach innen wachsenden Warzen und bei Nagelbandwarzen, die bereits seit vielen Jahren existieren, kann es lange dauern, bevor Sie feststellen, dass die Behandlung Wirkung zeigt, und es dauert erheblich länger, bevor eine solche Warze vollständig verschwunden ist.

WANN SOLLTE DIE BEHANDLUNG BEENDET WERDEN?

Beenden Sie die Behandlung mit EndWarts, wenn keine schwarzen Punkte mehr sichtbar sind oder wenn die Warze abgefallen oder eingeschrumpft bzw. an ihrer Stelle ein „Loch“ entstanden ist. Die Haut regeneriert nach erfolgreicher Behandlung. Setzt man die Behandlung zu lange fort, nachdem die Warze entfernt ist, färbt sich die Haut rosa und wird etwas wässrig. Dann ist die Behandlung mit EndWarts unverzüglich abzubrechen. Nach einigen Wochen untersuchen Sie die Stelle, an der die Warze saß. Ein kleiner Punkt kann darauf hinweisen, dass noch Warzenreste vorhanden sind. Dann sollte die Behandlung fortgesetzt werden.

SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Bei Schwangerschaft und Stillzeit sind keine Risiken bekannt.

NEBENWIRKUNGEN

- Vereinzelt kann es zu Empfindlichkeit, Schmerzen, Rötung, Entstehen einer Wunde oder Stechen kommen. Dies ist häufig auf Überdosierung oder die Verwendung von Pflastern zurückzuführen. Beim Auftreten von Nebenwirkungen ist die Behandlung ein paar Wochen lang zu unterbrechen, damit sich die Haut erholen kann.
- Bei der Anwendung einer zu großen Menge oder falls das Mittel versehentlich auf die Haut gelangt, kann die Außenhaut zusammenschrumpfen und es kann sich eine Blase bilden. Alle Nebenwirkungen auf der Haut verschwinden in der Regel innerhalb weniger Wochen.
- Gelegentlich kann bei der Anwendung ein stechendes Gefühl entstehen. Wird dieses als zu unangenehm empfunden, kann kaltes Wasser aufgetragen werden und das Gefühl verschwindet.

ENDWARTS NICHT ANWENDEN

- wenn die behandelte Warze empfindlich wird, blutet oder Irritationen oder Schmerzen an der Haut auftreten. Niemals eine empfindliche Warze weiter behandeln, sondern die Behandlung ein paar Wochen unterbrechen, damit sich die Haut erholen kann.
- EndWarts nicht in Kombination mit anderen Warzenentfernungsmethoden verwenden.

Lagerung: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern und vor direktem Sonnenlicht schützen.

Inhalt: Farblose Ameisensäure-Lösung (Ameisensäure, Wasser, Glycerin, Zitronenöl).

Verpackung: Glasflasche mit kindersicherem Drehverschluss, Gebrauchsanweisung und Wattestäbchen zum Auftragen.

Haltbarkeit: Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Flasche und außen auf dem Karton angegeben.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2012.

